


PLANTA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Массажное кресло

PLANTA MC-4000

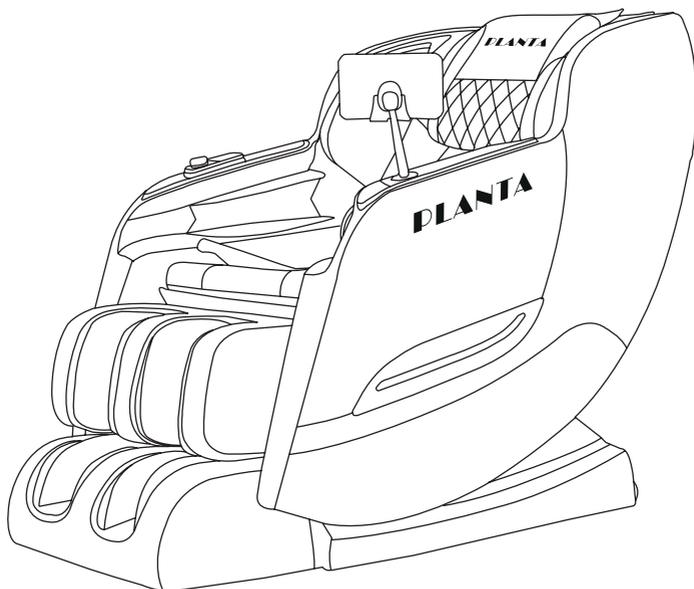

Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Применение и назначение

Уважаемый Покупатель, благодарим Вас за выбор **массажного кресла PLANTA MC-4000!**

Массажное кресло PLANTA MC-4000 позволит Вам наслаждаться массажем в любое время, не выходя из дома. Массажное кресло MC-4000 помогает успокоить нервную систему, снять стресс, быстро восстановить силы, расслабив мышцы плеч, шеи, спины, бедер, ягодиц, икр и стоп.

Данное устройство не является полноценной заменой медицинской терапии или физиотерапии. Если Вы не уверены, что это массажное кресло Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашего массажного кресла, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего прибора.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.planta-russia.ru



ВНИМАНИЕ! МАССАЖНОЕ КРЕСЛО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

Меры безопасности

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции и меры безопасности.

- Данное устройство работает от электросети. Поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Кабель не должен касаться острых краев.
- Для отключения или транспортировки прибора не тяните за кабель.
- Не используйте устройство дольше, чем 30 минут. Если Вы не используете устройство, отключите его от электрической сети.
- Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.
- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, в бассейне, сауне и вне помещения.
- НИКОГДА не используйте кресло во время сна и не засыпайте во время выполнения массажа.
- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.

- Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в массажное кресло.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.
- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Не размещайте массажное кресло на солнце или в месте с температурой выше 40°C, так как это приведет к выцветанию материала, из которого изготовлено массажное кресло, а также к возможному выведению из строя внутреннего механизма.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если во время или после использования устройства у Вас появилась боль, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Нельзя накрывать работающее устройство подушками, одеялами и т.п.
- Не допускайте зажимания провода питания или попадание его под основание кресла.
- Если у Вас длинные волосы, не позволяйте длинным волосам закрывать область массажа, чтобы избежать случайного запутывания.
- Не вставайте на кресло и не кладите на него тяжелые предметы.
- Не наступайте на массажные ролики, так как это может привести к их поломке.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- В устройстве имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 30 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.

- **Максимальный вес пользователя – 150 кг.**

 **ВНИМАНИЕ!**

- Во избежание травм спины не опирайтесь с усилием на роликовый массажный механизм при регулировке положения тела.
- Не допускайте чрезмерного давления или усилия любой части тела на движущийся роликовый механизм.
- Во избежание получения травм прилагайте к креслу только легкое усилие.

Предупреждения:



Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:

- беременны;
- используете кардиостимулятор и т.п.;
- страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков, любые болезни позвоночника, спины и суставов и др.;
- проходите реабилитацию после операции.


Примечание:

Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.

Описание массажного кресла

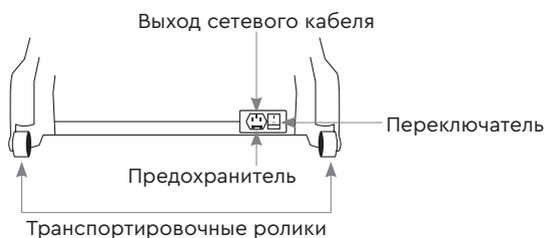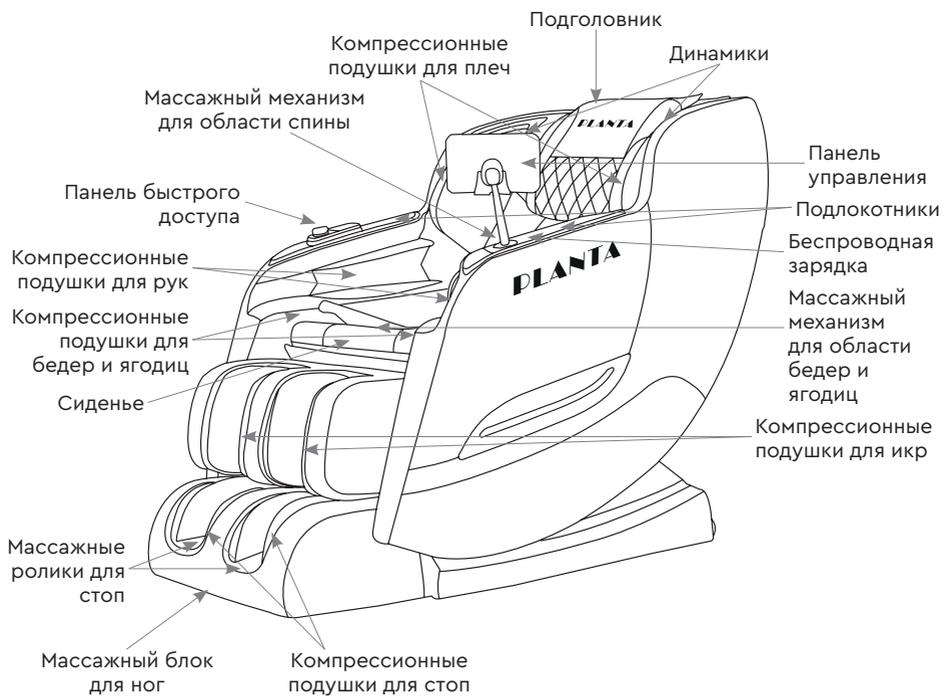

Панель управления

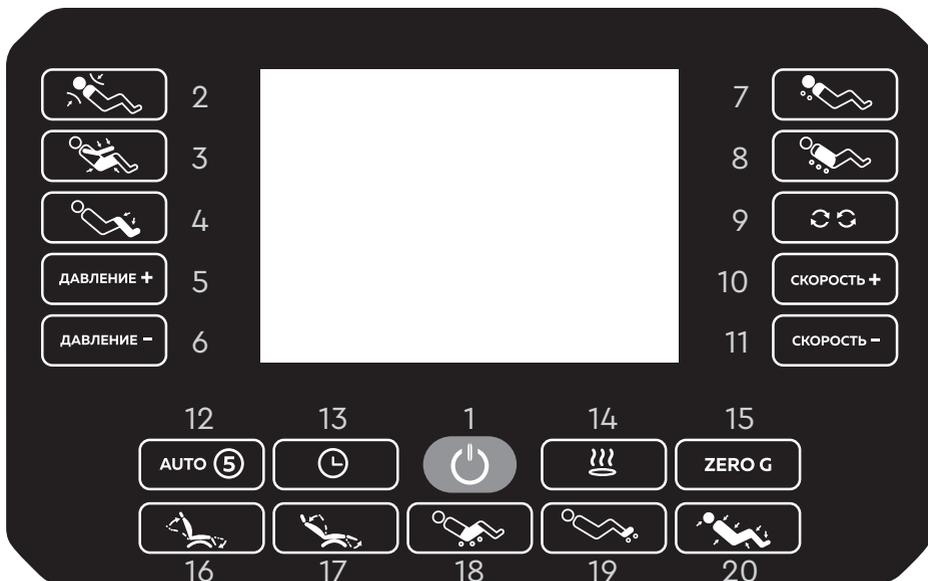

1.  Включение/выключение работы массажного кресла, активация функции Bluetooth.


***Примечание.** Для подключения функции Bluetooth на своем смартфоне выберите в списке допустимых подключений наименование «PLANTA». Функция Bluetooth активируется автоматически при включении массажного кресла. При возможном запросе пароля используйте PIN-код для подключения – 9999.*

2. **Плечи.** Включение/выключение режима воздушно-компрессионного массажа в области плеч (активация работы массажных подушек в области плеч).
3. **Руки + ягодицы.** Включение/выключение режима воздушно-компрессионного массажа в области рук, бедер и ягодиц (активация работы массажных подушек для рук, бедер и ягодиц).
4. **Ноги.** Включение/выключение режима воздушно-компрессионного массажа в области икр и стоп (активация работы массажных подушек в области икр и стоп).
5. **Давление «+».** Увеличение интенсивности воздействия компрессионных массажных подушек для области активированного режима массажа (на выбор предусмотрено 3 уровня интенсивности воздействия).

6. **Давление «-».** Уменьшение интенсивности воздействия компрессионных массажных подушек для области активированного режима массажа (на выбор предусмотрено 3 уровня интенсивности воздействия).
7. **Шея.** Включение/выключение режима разминающего массажа шеи (активация работы массажных роликов в области шеи).
8. **Спина.** Включение/выключение режима разминающего массажа спины (активация работы массажных роликов в области спины).
9. **Направление.** Выбор направления движения массажных роликов (по часовой стрелке/против часовой стрелки) для зоны активированного режима массажа.
10. **Скорость «+».** Увеличение скорости движения массажных роликов для области активированного режима массажа (на выбор предусмотрено 3 уровня скорости движения).
11. **Скорость «-».** Уменьшение скорости движения массажных роликов для области активированного режима массажа (на выбор предусмотрено 3 уровня скорости движения).
12. **АВТО.** Включение/выключение и выбор одной из 5 автоматических программ общего массажа всего тела. Выбрать необходимую программу можно, нажимая на кнопку АВТО до активации нужной автопрограммы (см. «Автоматические программы массажа»). Автопрограммы включают в себя чередование и/или сочетание воздушно-компрессионного и роликового массажа всего тела.
13. **Время.** Выбор времени массажа (5, 10, 15, 20, 25 или 30 минут).
14. **Подогрев.** Активация подогрева в области спины и икр.
15. **Невесомость.** Активация данной функции предусматривает приведение кресла в положение, при котором пользователь перестает ощущать вес собственного тела.
16. **«Положение «Сидя».** Опускание подставки для ног и одновременное поднятие спинки кресла для фиксации сидячего положения. Зажмите кнопку и удерживайте, пока не зафиксируется комфортный для Вас уровень наклона. Затем отпустите кнопку.
17. **«Положение «Лежа».** Поднятие подставки для ног и одновременное опускание спинки кресла для фиксации лежачего положения. Зажмите кнопку и удерживайте, пока не зафиксируется комфортный для Вас уровень наклона. Затем отпустите кнопку.

18. **Ягодицы.** Включение/выключение режима роликового массажа в области бедер и ягодиц.
19. **Стопы.** Включение/выключение режима роликового массажа в области стоп.
20. **Аэромассаж.** Включение/выключение режима воздушно-компрессионного массажа всего тела (активация работы всех массажных подушек – плечи, руки, бедра и ягодицы, икры, стопы).

Панель быстрого доступа

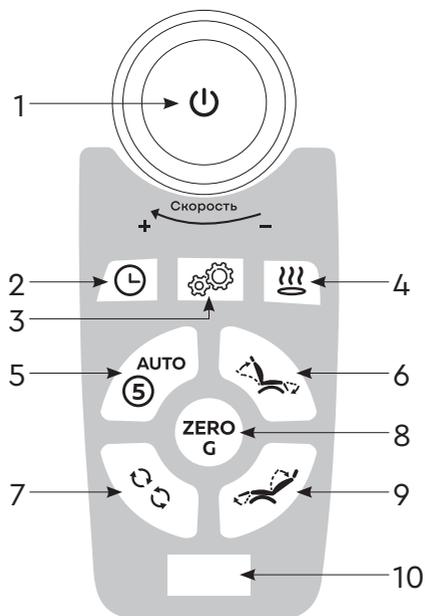

1. Включение/выключение работы массажного кресла/регулировка скорости движения массажных роликов, активация функции Bluetooth.

- Для включения массажного кресла нажмите на кнопку однократно.
- Для увеличения скорости движения массажных роликов активной области массажа поверните регулятор скорости вращения по часовой стрелке; для уменьшения скорости – против часовой стрелки (на выбор предусмотрено 3 уровня скорости движения).
- Для выключения массажного кресла нажмите на кнопку повторно.

2. **Время.** Выбор времени массажа (5, 10, 15, 20, 25 или 30 минут).

3. **Режим.** Активация одного из 3-х режимов работы массажного кресла:

Режим 1 **«Шея».** Активация режима разминающего массажа шеи (активация работы массажных роликов в области шеи). Для активации режима нажмите на кнопку 1 раз.

Режим 2 **«Спина».** Активация режима разминающего массажа спины (активация работы массажных роликов в области спины). Для активации режима

нажмите на кнопку 2 раза.

Режим 3 **«Шея + спина»**. Активация режима совместного разминающего массажа спины и шеи (активация работы массажных роликов в области спины и шеи). Для активации режима нажмите на кнопку 3 раза.

Последующее нажатие отключает работу всех режимов.

4. **Подогрев.** Активация подогрева в области спины и икр.
5. **Авто.** Включение/выключение и выбор одной из 5 автоматических программ общего массажа всего тела. Выбрать необходимую программу можно, нажимая на кнопку АВТО до активации нужной автопрограммы (см. «Автоматические программы массажа»). Автопрограммы включают в себя чередование и/или сочетание воздушно-компрессионного и роликового массажа всего тела.
6. **Вверх** (положение «Сидя»). Опускание подставки для ног и одновременное поднятие спинки кресла для фиксации сидячего положения. Зажмите кнопку и удерживайте, пока не зафиксируется комфортный для Вас уровень наклона. Затем отпустите кнопку.
7. **Направление.** Выбор направления движения массажных роликов (по часовой стрелке/против часовой стрелки) для зоны активированного режима массажа.
8. **Zero G** (невесомость). Активация данной функции предусматривает приведение кресла в положение, при котором пользователь перестает ощущать вес собственного тела.
9. **Вниз** (положение «Лежа»). Поднятие подставки для ног и одновременное опускание спинки кресла для фиксации лежачего положения. Зажмите кнопку и удерживайте, пока не зафиксируется комфортный для Вас уровень наклона. Затем отпустите кнопку.
10. **USB-разъем.** Предназначен для подзарядки мобильных устройств и других гаджетов.


Комплектация массажного кресла

Массажное кресло поставляется полностью в собранном виде и не требует дополнительной сборки.



Эксплуатация массажного кресла

 Внимательно прочтите инструкцию и указания по технике безопасности.


- Извлеките из коробки массажное кресло. Удалите все упаковочные материалы.
 - Внимательно осмотрите массажное кресло на предмет возможных дефектов, трещин или других повреждений. При их обнаружении не используйте прибор и обратитесь к продавцу.
1. Осмотрите массажное кресло.
 2. Убедитесь в отсутствии повреждений на кресле и шнуре питания.
 3. Убедитесь, что провод питания спинки кресла плотно соединен с разъемом питания на сиденье, а воздухопроводы надежно закреплены с помощью соединительной трубки:

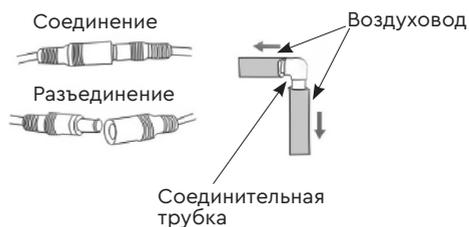


4. Опустите подставку для ног:

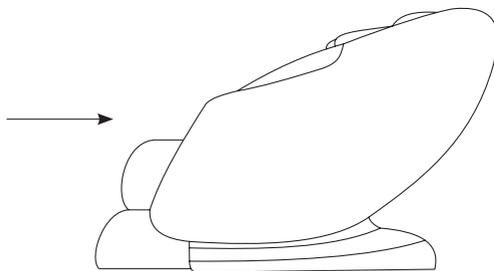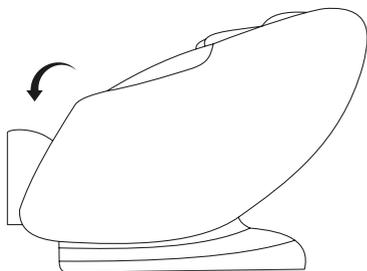

5. Убедитесь, что вокруг кресла достаточно пространства для его раскладывания:
- не менее 80 см позади кресла;
 - не менее 50 см перед креслом.

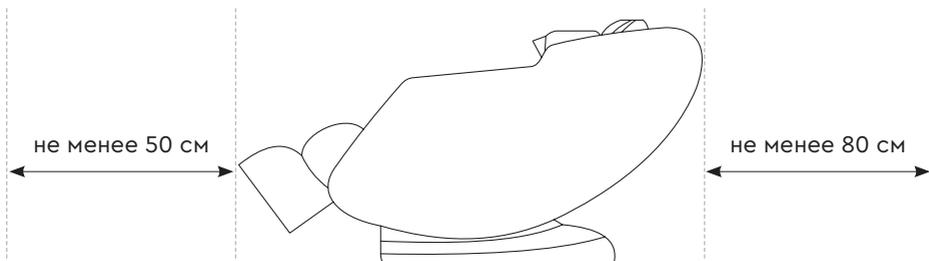

6. Убедитесь, что под креслом нет посторонних предметов.
7. Подключите адаптер к розетке электрической сети 220 В.
8. Нажмите переключатель в положение «ВКЛ» в нижнем углу задней части спинки кресла.

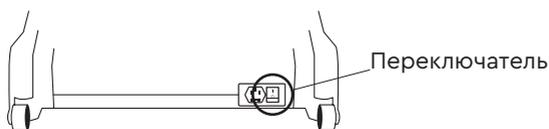

9. Нажмите кнопку  на панели управления для включения устройства. По умолчанию активируется автоматический режим «1». Данный режим предусматривает активацию режима воздушно-компрессионного массажа «Аэромассаж» с уровнем давления 2, а также режимов роликового массажа «Шея», «Спина», «Ягодицы», «Стопы» на 2-ой скорости.

Примечание. При включении массажного кресла автоматически активируется функция Bluetooth. При этом прозвучит звуковой сигнал.

10. Выберите нужный режим массажа нажатием на соответствующую кнопку на панели управления или панели быстрого доступа (см. «Режимы и функционал массажного кресла»):
- С помощью кнопок  и  выберите комфортный для Вас уровень положения спинки и подставки для ног или с помощью кнопки  активируйте функцию «Невесомость».

- С помощью кнопки  выберите необходимое время массажа (5, 10, 15, 20, 25 или 30 минут).
 - При желании Вы можете активировать функцию подогрева спины и икр, нажав кнопку . Для отключения подогрева нажмите кнопку повторно.
11. Нажатие на кнопку  во время работы массажного кресла прерывает цикл работы программы и отключает массажное кресло.
 12. По завершении массажа выключите прибор из розетки.

Режимы и функционал массажного кресла

- **Режимы воздушно-компрессионного массажа**

1. Режим ПЛЕЧИ



Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа в области плеч и шеи с уровнем давления 1.

2. Режим РУКИ + ЯГОДИЦЫ



Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа в области рук, бедер и ягодиц с уровнем давления 1.

3. Режим НОГИ



Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа в области икр и стоп с уровнем давления 1.

4. Режим АЭРОМАССАЖ



Данный режим предусматривает активацию воздушно-компрессионного массажа всего тела (активация работы всех массажных подушек – плечи, руки, бедра, ягодицы, икры, стопы) с уровнем давления 1.

Примечание! После активации одного из 4-х режимов воздушно-компрессионного массажа с помощью кнопок **«Давление «+»** и **«Давление «-»** Вы можете выбрать комфортный для Вас уровень интенсивности воздействия компрессионных массажных подушек (1, 2 или 3 уровень интенсивности).

Примечание! При включении режимов «Плечи», «Руки + ягодицы», «Ноги», а также при нажатии на кнопки **«Скорость «+»** и **«Скорость «-»** режим **«АЭРОМАССАЖ»** автоматически прекращает работу.

- **Режимы роликового массажа**

1. Режим ШЕЯ



Данный режим предусматривает активацию режима разминающего массажа шеи (активация работы массажных роликов в области шеи) со 2-ой скоростью движения массажных роликов.

2. Режим СПИНА



Данный режим предусматривает активацию режима разминающего массажа спины (активация работы массажных роликов в области спины) со 2-ой скоростью движения массажных роликов.

3. Режим ЯГОДИЦЫ



Данный режим предусматривает активацию режима разминающего массажа бедер и ягодиц (активация роликового массажа в области бедер и ягодиц) со 2-ой скоростью движения массажных роликов.

4. Режим СТОПЫ



Данный режим предусматривает активацию режима роликового массажа стоп со 2-ой скоростью движения массажных роликов.

Примечание! После активации одного из 4-х режимов роликового массажа с помощью кнопок **«Скорость +»** и **«Скорость -»** Вы можете выбрать комфортную для Вас скорость движения массажных роликов (1, 2 или 3 уровень скорости), а с помощью кнопки  – выбрать направление движения массажных роликов (по/против часовой стрелки).

- **Автоматические программы массажа**



На выбор предустановлено 5 автоматических программ. Для переключения между автоматическими программами нажимайте кнопку  до активации нужного Вам режима.

- **Автопрограмма «1».**

Активация режима воздушно-компрессионного массажа «Аэромассаж» с уровнем давления 2, а также режимов роликового массажа «Шея», «Спина», «Ягодицы», «Стопы» на 2-ой скорости.

- **Автопрограмма «2».**

Активация режима воздушно-компрессионного массажа «Аэромассаж» с уровнем давления 2, а также режимов роликового массажа «Шея», «Спина», «Ягодицы», «Стопы» на 2-ой скорости. От автопрограммы «1» отличается направлением движения массажных роликов в области спины и шеи.

- **Автопрограмма «3».**

Активация режимов роликового массажа «Шея» и «Спина» с попеременным изменением направления движения массажных роликов, а также режимов «Ягодицы» и «Стопы» на 2-ой скорости с дополнительной активацией режима воздушно-компрессионного массажа «Аэромассаж» с уровнем давления 2. Данная программа предусматривает больший акцент на роликовый массаж.

- **Автопрограмма «4».**

Активация режима воздушно-компрессионного массажа «Аэромассаж» с уровнем давления 2 с дополнительной активацией режимов роликового массажа «Шея» и «Спина» с попеременным изменением направления движения массажных роликов, а также режимов «Ягодицы» и «Стопы» на 2-ой скорости. Данная программа предусматривает больший акцент на воздушно-компрессионный массаж.

- **Автопрограмма «5».**

Активация режима воздушно-компрессионного массажа «Аэромассаж» с уровнем давления 2, режимов роликового массажа «Шея» и «Спина» с попеременным изменением направления движения массажных роликов, а также режимов «Ягодицы» и «Стопы» на 2-ой скорости. Дополнительно активируется функция покачивания (легкое попеременное изменение угла наклона кресла во время массажа).

Примечание! При включении режимов «Плечи», «Руки + ягодицы», «Ноги», «Аэромассаж», «Шея», «Спина», «Ягодицы», «Стопы» автоматические программы прекращают свою работу.

- **Функция невесомости «Zero G»**



Активирование данной функции переводит массажное кресло в положение, при котором пользователь перестает ощущать вес собственного тела, словно оказываясь в состоянии невесомости. Это способствует максимальному расслаблению, обеспечивающему наиболее эффективную проработку мышц.

Нажмите на панели управления или панели быстрого доступа кнопку  для активации функции невесомости. Для отключения функции и возврата в исходное положение нажмите кнопку  повторно.

Примечание! Данная функция активна для всех режимов кресла.

- **Функция «Подогрев»**



Нажмите кнопку  для активации подогрева в области спины и икр. Для выключения функции подогрева нажмите кнопку  повторно.

Совместимость режимов и функций массажного кресла

Режим		Давление «-», «+»  	Время 5, 10, 15, 20, 25, 30 МИН 	Подогрев 	Невесомость 	Положение «Сидя»/ «Лежа»  	Скорость «-», «+»  	Направление 
1	Плечи 	+	+	+	+	+	-	-
2	Руки+ ягодицы 	+	+	+	+	+	-	-
3	Ноги 	+	+	+	+	+	-	-
4	Аэро- массаж 	+	+	+	+	+	-	-
5	Авто 							
	1	+	+	+	+	+	-	-
	2	+	+	+	+	+	-	-
	3	+	+	+	+	+	-	-
	4	+	+	+	+	+	-	-
5	+	+	+	+	+	+	-	-
6	Стопы 	-	+	+	+	+	+	+
7	Ягодицы 	-	+	+	+	+	+	+
8	Шея 	-	+	+	+	+	+	+
9	Спина 	-	+	+	+	+	+	+

Совместимость режимов массажного кресла между собой

Массажное кресло предусматривает как автономную работу каждого режима, так и активацию сразу нескольких режимов. Ниже приведена таблица совместимости режимов массажного кресла между собой.

Режим	Плечи	Руки+ягодицы	Ноги	Аэромассаж	Авто 					Стопы	Ягодицы	Шея	Спина
					1	2	3	4	5				
1		+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
2	+		+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
3	+	+		-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
4	-	-	-		-	-	-	-	-	+	+	+	+
5	Авто 												
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+
7		+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	+	+
8		+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
9		+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-

! **ВНИМАНИЕ!** При использовании кресла следите, чтобы сетевой провод питания не был поврежден или зажат под креслом.

ПРИМЕЧАНИЯ:


- Не забывайте отключить прибор от сети, если он не используется.
- Не пытайтесь вставать на кресло.
- Не используйте функции массажа или подогрева непрерывно более 30 минут. Полезное действие массажа составляет 30 минут – что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.

! **Внимание!**

- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и обратитесь к продавцу.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполнять только уполномоченные представители производителя.
- Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно!

Перемещение кресла

Перед перемещением массажного кресла убедитесь, что кнопка питания находится в положении Выкл, провод питания отсоединен. Возьмитесь за углубление в задней спинке кресла двумя руками, слегка наклоните его на себя и переместите кресло на нужное место, используя транспортировочные ролики, расположенные в задней части спинки кресла.

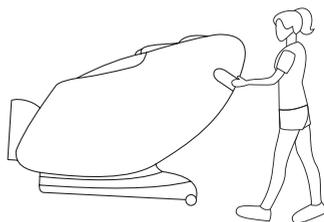

Уход и хранение

Правильное обслуживание поможет поддерживать массажное кресло в хорошем техническом состоянии и продлить его срок службы. Неправильное же техническое обслуживание может привести к повреждению или сокращению срока службы массажного кресла.

Предупреждение: перед очисткой или обслуживанием массажного кресла обязательно отключите вилку питания.

- Регулярно удаляйте пыль влажной тряпкой.
- Перед чисткой выключите устройство и отключите его от сети, дайте креслу остыть.
- Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.
- Никогда не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрические части массажного кресла.



Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду. Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью высохнет.



Внимание! Запрещено снимать панели устройства или открывать застёжки, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.

- Если Вы не используете массажер, храните его в сухом месте вдали от воздействия прямых солнечных лучей.
- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей устройства.
- Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.
- Избегайте соприкосновения аппарата с острыми или режущими предметами, которые могут повредить ткань.
- Во избежание поломки не сворачивайте шнур вокруг кресла.

Возможные неполадки и способы их устранения

Проблема	Возможная причина	Решение
Не включается	Устройство не подключено	Убедитесь, что устройство включено в сеть
		Проверьте правильность подключения адаптера
	Устройство включено неправильно	Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
Устройство неожиданно отключилось	Вы используете массажер более 30 мин	Это нормально, устройство исправно работает
Массажные ролики двигаются слишком медленно	Слишком большое давление на массажные ролики	Уменьшите давление на массажные ролики
Слышен громкий звук во время использования кресла	Звук вызван работой массажного механизма	Это нормальная ситуация при работе массажера

Технические характеристики

Модель: МС-4000

Питание: 220 В, 50–60 Гц

Мощность: 90 Вт


Размер прибора: 143 x 73,5 x 102 см

Размер подголовника: 42 x 37 см

Ширина сидения: 53 см

Вес нетто: 55 кг

Материал: ABS-пластик, полиэстер

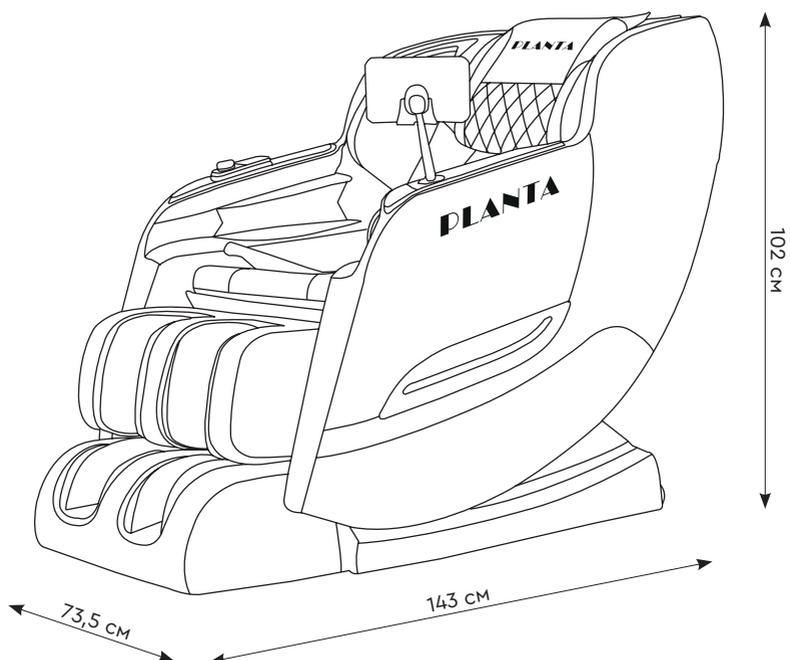

Гарантийный талон

<p>Условия гарантии</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: <ul style="list-style-type: none"> - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 	<p>Гарантийный талон</p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p>
<ol style="list-style-type: none"> 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. <p>Дата изготовления указана на упаковке.</p> <p>Изготовитель: «Фуцзянь Эпос Текнолоджи Ко., Лтд.»</p>	<p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя:</p> <p>_____</p>
<p>Адрес: Ванци Индастриал Парк, Фуань Сити, Провинция Фуцзянь, Китай</p> <p>Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАЙМ»</p>	<p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца:</p> <p>_____</p>
<p>Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1</p> <p>Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32</p> <p>Товар сертифицирован</p> <p>Сделано в Китае</p> <p>класс защиты I </p>	<p>М.П.</p>